

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
|  Rumah Sakit Unhas | PRECLEANING | | |
| | Nomor Dokumen 427/UN4.24.0/OT .01.00/2023 | Nomor Revisi 00 | Halaman 1 dari 2 |
| PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR INSTALASI CSSD DAN LAUNDRY | Tanggal Terbit 10 Januari 2023 |  | |
| Pengertian | Proses pembersihan instrument dari pengotor pada poin of use sesaat setelah penggunaan pada pasien dengan cara fisik | | |
| Tujuan | <ul style="list-style-type: none"> - Mencegah terjadinya korosif pada alat - Mencegah terjadinya pembentukan bio film - Menjaga kelembaban sehingga mudah dalam proses selanjutnya | | |
| Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan direktur Rumah Sakit Unhas nomor : 12/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi di Rumah Sakit Unhas - | | |
| Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilangkan kotoran pada permukaan alat 2. Untuk alat yang memiliki komponen electrical semprot dengan cairan precleaning (jika ada), sesaat setelah instrumen dipakai 3. Masukkan kedalam pouches/kontainer untuk menjaga kelembaban 4. Kirim ke unit CSSD untuk dilakukan penanganan lebih lanjut | | |
| Unit Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat inap 2. Rawat Jalan 3. COT 4. Kemoterpi 5. Radioterapi 6. ICU 7. IGD 8. Hemodialisa | | |



Rumah Sakit Unhas

PRE CLEANING

Nomor Dokumen
427/UN4.24.0/OT.01.0
0/2023

Nomor Revisi
00

Halaman
2 dari 2

9. FER

Dokumen terkait

- Lembar serah terima

Petugas terkait

- Unit pengguna

Diagram Alur

