

 Rumah Sakit Unhas	DEKONTAMINASI		
	Nomor Dokumen 787/UN4.24.0/OT .01.00/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 1 dari 2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR INSTALASI CSSD DAN LAUNDRY	Tanggal Terbit 10 Januari 2023		
Pengertian	Proses pembersihan segala bentuk pencemar yang melekat pada instrumen dengan cara kimia dan/atau fisik		
Tujuan	- Mencegah terjadinya korosif pada alat - Mencegah terjadinya pembentukan bio film - Proses desinfeksi menjadi efektif		
Kebijakan	- Peraturan direktur Rumah Sakit Unhas nomor : 12/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi di Rumah Sakit Unhas -		
Prosedur	1. Buka pengunci dan/atau sambungan instrument 2. Rendam dalam larutan enzymatic yang sudah disiapkan selama 10-15 menit (sesuai rekomendasi pabrikan) 3. Bersihkan seluruh permukaan instrument menggunakan sikat halus/sponge 4. Bilas instrument hingga bersih		
Unit Terkait	-		
Dokumen terkait	- Lembar serah terima		
Petugas terkait	- Staf CSSD		

 Rumah Sakit Unhas	DEKONTAMINASI		
	Nomor Dokumen 787/UN4.24.0/OT.01.0 0/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 2 dari 2
Diagram Alur	Buka pengunci/ sambungan instrumen ↓ Rendam dalam larutan enzimatic ↓ Bersihkan seluruh permukaan instrumen ↓ Bilas hingga bersih		