

 Rumah Sakit Unhas	STERILISASI PLASMA		
	Nomor Dokumen 794/UN4.24.0/OT .01.00/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 1 dari 2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR INSTALASI CSSD DAN LAUNDRY	Tanggal Terbit 18 Januari 2023		
Pengertian	Proses in aktifasi segala bentuk kehidupan mikroorganisme termasuk endospore menggunakan metode gas hydrogen peroksida konsentrasi 50% dengan suhu rendah		
Tujuan	Menghasilkan produk bahan/alat medik steril yang siap digunakan pada pelayanan pasien yang membutuhkan bahan/alat steril dalam proses perawatan		
Kebijakan	- Peraturan direktur Rumah Sakit Unhas nomor : 12/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi di Rumah Sakit Unhas -		
Prosedur	1. Pastikan alat yang akan disterilkan sudah betul-betul kering 2. Atur bahan/alat pada tray 3. Catat nama alat yang akan disterilkan pada form sterilisasi 4. Berikan jarak antara alat yang disusun pada trolley agar chamber tidak melebihi kapasitas normal 5. Pilih program pada mesin 6. Masukkan bahan/alat kedalam chamber sterilisator 7. Sertakan indicator biologi pada proses strerilisasi yang terdapat implant 8. Jalankan mesin sterilisator 9. Catat nomor cycle mesin pada form sterilisasi 10. Jika proses sterilisasi selesai diamkan bahan/alat pada chamber mesin plasma dalam kondisi pintu terbuka 11. Keluarkan bahan/alat dari chamber jika waktu cooling down telah tercapai 20 menit		
Unit Terkait	-		

Dokumen terkait	Form Sterilisasi		
 Rumah Sakit Unhas	STERILISASI PLASMA		
	Nomor Dokumen 795/UN4.24.0/OT.01.0 0/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 2 dari 2
Staf Terkait	Staf CSSD		
Diagram Alur	Pastikan alat sudah betul-betul kering Atur bahan/alat pada tray Catat nama bahan/alat pada form sterilisasi Atur jarak alat dalam chamber Pilih program pada mesin Ada implan ? Y Berikan indikator biologi N Jalankan mesin Catat nomor cycle mesin Cycle completed Buka pintu mesin Cooling down 20 menit		