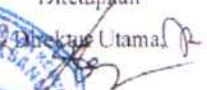

 Rumah Sakit Unhas	DISNFEKSI TINGKAT TINGGI (DTT)		
	No. Dokumen 125282/UN4.24/ OT.01.00/2019	No. Revisi 00	Halaman 1/2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	Tanggal Terbit 30 Desember 2019	Ditetapkan   Prof. Dr. dr. Syaiful Arif, Sp.An.KIC.KAKV NIP. 196705241995031001	
Pengertian	Kegiatan DTT adalah kegiatan inaktivasi mikroorganisme dengan cara kimiawi atau fisika terhadap peralatan semi kritikal.		
Tujuan	Pencegahan infeksi dan efisiensi pelayanan		
Kebijakan	Kegiatan DTT Sebagai Upaya Pencegahan Infeksi Sesuai dengan Peraturan Direktur Utama No : 49/UN4.24/2019 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Sterilisasi		
Prosedur	a. Bongkar sambungan-sambungan yang terdapat pada alat b. Membersihkan peralatan dari pencemar kasat mata c. Rendam alat dalam larutan desinfektan d. Bilas dengan air steril (air filtrasi atau aquades) e. Keringkan dengan lap kering bersih atau udara tekan f. Kirim ke ruang packing		
Unit Terkait	1. Rawat Inap Kelas 2 dan 3 2. Rawat Inap Kelas 1 3. Rawat Inap VVIP 4. Rawat Inap VIP 5. Rawat Inap Mata 6. COT 7. Kemoterapi 8. Hemodialisa 9. ICU 10. UGD 11. Poliklinik 12. Laboratorium		
Dokumen Terkait	Lembar Kegiatan Harian CSSD		



Rumah Sakit Unhas

DISNFEKSI TINGKAT TINGGI (DTT)

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman	
125276/UN4.24/ OT.01.00/2019	00	2/2	
Petugas Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Rawat Inap Kelas 2 dan 32. Petugas Rawat Inap Kelas 13. Petugas Rawat Inap VVIP4. Petugas Rawat Inap VIP5. Petugas Rawat Inap Mata6. Petugas COT7. Petugas Kemoterapi8. Petugas Hemodealisa9. Petugas ICU10. Petugas UGD11. Petugas Poliklinik12. Petugas Laboratorium13. Petugas CSSD		
Diagram Alir	-		