

 Rumah Sakit Unhas	PEMASANGAN BLOODLINE PADA MESIN HEMODIALISIS		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman
	5000/UN4.24/OT.01.00/2022	1	1/2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UNIT DIALISIS	Tanggal Terbit 06 Juni 2022	 Ditetapkan, Direktur Utama, Dr. St. Masuri Taduddin Chalid, Sp. OG (K), NIP. 196704091996012001	
Pengertian	Prosedur pemasangan blood line pada mesin hemodialisis sebagai bagian dari prosedur hemodialisis di Rumah Sakit Unhas.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam prosedur pemasangan blood line pada mesin hemodialisis, sehingga tindakan hemodialisis di Rumah Sakit Unhas memiliki standar prosedur yang sama dan dapat diikuti oleh semua petugas yang terkait.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 91/UN4.24/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit Unhas.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu mesin hemodialisis, satu set blood line, infus set, dan cairan NaCl 0,9% 500 ml atau 1 liter. 2. Perawat cuci tangan 3. Perawat memakai sarung tangan. 4. Mengambil dan mengecek set blood line yang masih terbungkus rapi dan utuh dalam kemasan. 5. Memastikan blood line tidak ada kerusakan. 6. Membuka kemasan blood line yang terdiri dari <i>arteri blood line</i> dan <i>venous blood line</i>. 7. Memasang <i>arteri blood line</i> dengan urutan <ol style="list-style-type: none"> a. Pasang <i>bubble trap arteri</i> pada tempatnya dengan posisi tegak lurus. b. Masukkan segment <i>arterial line</i> ke dalam segment pump, kemudian putar searah/berlawanan arah dengan arah jarum jam (tergantung tipe mesin). c. Mengikuti jalur yang ada pada mesin untuk mendapatkan <i>bubble trap arteri</i> agar posisinya tegak lurus. 8. Memasang <i>venous blood line</i> dimulai dengan memasukkan <i>bubble trap</i> 		



Rumah Sakit Unhas

PEMASANGAN BLOODLINE PADA MESIN HEMODIALISIS

Nomor Dokumen

5000/UN4.24/OT.01.00/2022

Nomor Revisi

1

Halaman

1/2

vena ke dalam tempatnya kemudian memasang venous detector lalu menempatkan ujung *venous blood line* ke gelas ukur.

9. Selama pemasangan *blood line* tidak boleh menyentuh lantai.

10. Memasang infus set pada NaCl 0,9% dan sambungkan dengan inlet *arteri blood line*.

Unit Terkait

1. Unit Dialisis
2. Instalasi Farmasi
3. Teknisi

Dokumen Terkait

SPO Pemasangan Bloodline pada Mesin Hemodialisis

Petugas Terkait

1. Staf Unit Dialisis
2. Staf Farmasi
3. Staf IPSRS